

CardiAid®

Public Access Defibrillator



Hoe moet de CardiAid AED worden gebruikt?



- 1** Vergewis u eerst van dat de hulpdiensten zijn gebeld, of vraag iemand anders voor u te bellen.

Open het deksel van de CardiAid en volg de instructies.

2



- 3** Verwijder de kleding van het bovenlichaam en plaats de elektroden op de ontblote borst zoals afgebeeld op de verpakking van de elektroden. Gebruik indien nodig de schaar uit de noodkit van de CardiAid om kleding open te knippen.

Raak de patiënt vanaf dit moment niet meer aan. De CardiAid start automatisch met het analyseren van het hartritme wanneer de elektroden zijn aangesloten.


4



- 5** De CardiAid zal u informeren of een electroschok nodig is of niet. Indien nodig bereidt het de schok automatisch voor.

Druk op de schokknop als hier instructies voor volgen. Voordat u de knop indrukt, moet u zich ervan vergewissen dat patiënt niet meer wordt aangeraakt of verplaatst. In de volautomatische versie, waarschuwt het apparaat de gebruiker en geeft de electroschok automatisch.

6

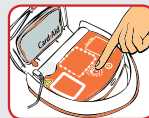

- 7** De CardiAid zal u blijven begeleiden bij de reanimatie. Geef volgens de instructies nu 30 keer hartmassage en 2 keer mond op mond beademing.

Ga door met de reanimatie totdat u hoort "Patiënt nu niet meer aanraken." De CardiAid zal het hartritme weer analyseren en een andere schok toedienen als dit nodig is

8



- 9** Maak de elektroden niet los en blijf de instructies van de CardiAid volgen totdat professionele hulp arriveert.

Controleer de status van het apparaat voordat wij het doen:



Het apparaat is klaar voor gebruik als de groene "OK-indicator" knippert.



CD 020RC002-NL v.3.0.40403

Belangrijk: Deze verkorte handleiding vervangt niet de CardiAid gebruikers handleiding.

CardiAid®

Public Access Defibrillator




Comment utiliser le DEA CardiAid?



- 1** D'abord, assurez-vous que vous avez téléphoné aux services d'urgence ou demandé à quelqu'un de téléphoner pour vous.

Ouvrez le couvercle de CardiAid et suivez les instructions.

2

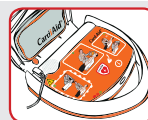

- 3** Ôtez les habits de la poitrine et mettez les électrodes sur la poitrine nue comme illustré sur l'emballage d'électrodes. Si nécessaire, utilisez les ciseaux du kit d'urgence de CardiAid pour couper les habits.

Ne touchez plus le patient à partir de maintenant. CardiAid commence automatiquement à analyser le rythme cardiaque quand les électrodes sont reliées

4



- 5** CardiAid vous informera si un électrochoc est nécessaire ou non. Si nécessaire, il prépare automatiquement le choc.

Appuyez sur le bouton de choc quand il vous demande de le faire. Avant d'appuyer sur le bouton, assurez-vous que le patient n'est pas touché ou bougé. Avec le modèle entièrement automatique, l'appareil avertit l'utilisateur et administre automatiquement l'électrochoc.

6



- 7** CardiAid continuera à vous guider durant la RCP. Selon les instructions, effectuez 30 compressions thoraciques et faites 2 insufflations bouche-à-bouche

Continuez la RCP jusqu'à ce que vous entendiez "Ne touchez plus le patient à partir de maintenant." CardiAid va analyser de nouveau le rythme cardiaque et administrera un autre choc si nécessaire.

8



- 9** Ne détachez pas les électrodes et continuez de suivre les instructions de CardiAid jusqu'à l'arrivée d'une aide professionnelle.

Vérifiez l'état de l'appareil avant l'utilisation:



L'appareil est prêt à l'utilisation si le "Symbole OK" vert clignote.



CD 020RC002-FR v.3.0.40403